

anasept[®]

Solution Antimicrobienne D'irrigation De Plaie
Réservé À Un Usage Professionnel/Hospitalier

Santé Canada Licence # 97053

Référence Catalogue 41601C, Contenu Net : 473 ml (16 oz)

DESCRIPTION DU PRODUIT :

La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept est un liquide isotonique transparent facilitant l'enlèvement mécanique des débris sur le site nettoyé, tout en appliquant 0,057 % d'hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large sur le site au moyen d'un appareil de traitement de plaie par pression négative. La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept empêche la croissance de nombreuses bactéries, notamment : *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Serratia marcescens*, *Escherichia coli* résistant au carbapénem, *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline), *Enterococcus faecalis* résistant à la vancomycine, de même que les microchampignons, p. ex. *Candida albicans* et *Aspergillus niger*, souvent présents dans les plaies.

INDICATIONS :

La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept a été conçue pour une utilisation sous la supervision d'un professionnel de la santé pour le nettoyage des microorganismes et autres corps étrangers sur les plaies, notamment : ulcères de pression de stade I-IV, ulcères de pied diabétique, plaies post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de greffe et les plaies de donneur.

MODE D'EMPLOI :

CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN ADAPTATEUR POINTU VENTILÉ

1. Enlever le pare-poussière sur l'embout.
2. Insérer la pointe ventilée.
3. Tirer la sangle vers le haut et accrocher sur une tige verticale ou sur un appareil de traitement de plaie par pression négative.
4. Appliquer la solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept au moyen d'un appareil de traitement de plaie par pression négative (suivre les instructions d'utilisation du fabricant de l'appareil).
5. Ne pas rincer.
6. Répéter au besoin.

SANS LATEX.

AVERTISSEMENT : Réservé à un usage externe. Ne doit pas être injecté ni appliqué sur les yeux.

Conserver à température ambiante jusqu'à 25 °C (77 °F).

ÉLIMINATION : Les produits Anasept sont sans danger pour l'environnement et peuvent être jetés dans un lavabo ou un système d'égout.



Fabriqué par : Anacapa Technologies, Inc.
301 E. Arrow Highway Ste. 106
San Dimas, CA 91773, USA

(800)-489-2591

www.anacapa-tech.net

Anasept[®] est une marque déposée appartenant à Anacapa Technologies, Inc.

Solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept[®], notice en français

Produit fabriqué aux États-Unis

Version 00