

SANI-ZONE

Désodorisant très puissant Sani-Zone^{MC} pour accessoire de stomie

CRÉE UNE ZONE DE FRAÎCHEUR

Référence catalogue 1002-OD, contenu net : 59,3 ml (2 oz)

Référence catalogue 1008-OD, contenu net : 237 ml (8 oz)

Le désodorisant très puissant Sani-Zone^{MC} pour accessoire de stomie procure un contrôle prolongé des odeurs désagréables associées aux accessoires de stomie et crée une zone de fraîcheur durable.

MODE D'EMPLOI :

Verser 5 gouttes ou plus de désodorisant Sani-Zone^{MC} pour accessoire de stomie dans la poche de stomie lors de chaque vidage ou lors de chaque changement d'accessoire.

ATTENTION :

Produit nocif si ingéré. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants.

CONTENU :

Eau purifiée, alcool spécialement dénaturé 40, polysorbate 20, triéthylèneglycol, parfum, chlorure de benzéthonium, EDTA



Fabriqué par : Anacapa Technologies, Inc.
301 E. Arrow Highway Ste. 106
San Dimas, CA 91773, USA

(800)-489-2591

www.anacapa-tech.net

Sani-Zone^{MC} est une marque déposée appartenant à Anacapa Technologies, Inc.

Désodorisant Sani-Zone pour accessoire de stomie, notice en français

Produit fabriqué aux États-Unis

Version 00