

# Staytex™

## Bandage tubulaire élastique

Référence catalogue 6000TX : (longueur prédécoupée : 22 po / 56 cm) : compatible avec circonférence jusqu'à 24 po (61 cm)

Référence catalogue 6006TXP : (longueur prédécoupée : 34 po / 86 cm) : compatible avec circonférence jusqu'à 36 po (91 cm)

Référence catalogue 6010FTX : 120 po (305 cm) de pansement tubulaire élastique compatible avec circonférence jusqu'à 36 po (91 cm)

- Non stérile
- Sans latex
- Retient le pansement sur le site traité
- Immobilise le pansement sur la plaie
- Facile à installer et à réutiliser
- Confortable
- Peut être coupé à la longueur désirée
- Lavable et réutilisable
- Élimine la nécessité de bandelettes encombrantes et inefficaces

### MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec un nettoyant approprié, p. ex., nettoyant antimicrobien Anasept<sup>MD</sup> pour la peau et les plaies (non inclus).
- Appliquer un gel approprié directement sur la plaie, p. ex., gel antimicrobien Anasept<sup>MD</sup> pour la peau et les plaies (non inclus).
- Recouvrir la plaie avec un pansement stérile (non inclus).
- Couper à la longueur appropriée, avec des ciseaux. Référence catalogue 6010FTX : Ouvrir la boîte de distribution sur les perforations et sortir l'extrémité du bandage tubulaire Staytex+. Avec des ciseaux, couper le bandage à la longueur désirée.
- Rouler le bandage tubulaire Staytex sur la main comme pour mettre une chaussette sur le pied.
- Placer le bandage Staytex sur le pied jusqu'à ce que les orteils soient visibles, puis dérouler complètement le bandage sur la jambe.
- Pour éviter que le bandage tubulaire Staytex ne se déplace sur le membre, retourner le haut du bandage Staytex pour faire une double épaisseur d'environ 3 po (76 mm). Il est également possible de retourner le bandage Staytex pour éviter qu'il s'enroule.
- Enlever chaque jour le bandage pour remplacer le pansement puis réinstaller le bandage normalement.

### ENTRETIEN RECOMMANDÉ :

- Le bandage Staytex peut être lavé à la machine dans l'eau froide. Suspendre pour sécher.
- Enlever les taches de sang avec du peroxyde d'hydrogène.



Fabriqué par : Anacapa Technologies, Inc.  
301 E. Arrow Highway Ste. 106  
San Dimas, CA 91773, USA

(800)-489-2591  
www.anacapa-tech.net

Les produits Anasept<sup>MD</sup>, Staytex<sup>MC</sup> et Staytex+<sup>MC</sup> sont fabriqués aux États-Unis par Anacapa Technologies, Inc.

Anasept<sup>MD</sup>, Staytex<sup>MC</sup> et Staytex+<sup>MC</sup> sont des marques de commerce appartenant à Anacapa Technologies, Inc.

Produit fabriqué  
aux États-Unis

Version 00