

anasept^{MD}

Solution Antimicrobienne D'irrigation De Plaie
Réservé À Un Usage Professionnel/Hospitalier

N° de permis Sante' Canada : 97053

Référence Catalogue **4160IC**, Contenu Net : 473 ml (16 oz)

DESCRIPTION DU PRODUIT :

La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept^{MD} est un liquide isotonique transparent facilitant l'enlèvement mécanique des débris sur le site nettoyé, tout en appliquant 0,057 % d'hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large sur le site au moyen d'un appareil de traitement de plaie par pression négative. La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept^{MD} empêche la croissance de nombreuses bactéries, notamment : *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* résistant au carbapénem (ERC), *Entérocooccus faecalis* résistants à la vancomycine (ERV) et *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) souvent présentes dans les plaies, de même que les microchampignons p. ex. *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, et *Candida auris*.

INDICATIONS :

La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept^{MD} a été conçue pour une utilisation sous la supervision d'un professionnel de la santé pour le nettoyage des microorganismes et autres corps étrangers sur les plaies, notamment : ulcères de pression de stade I-IV, ulcères de pied diabétique, plaies post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de greffe et les plaies de donneur.

MODE D'EMPLOI : CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN ADAPTATEUR POINTU VENTILÉ

1. Enlever le pare-poussière sur l'embout.
2. Insérer la pointe ventilée.
3. Tirer la sangle vers le haut et accrocher sur une tige verticale ou sur un appareil de traitement de plaie par pression négative.
4. Appliquer la solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept^{MD} au moyen d'un appareil de traitement de plaie par pression négative (suivre les instructions d'utilisation du fabricant de l'appareil).
5. Ne pas rincer.
6. Répéter au besoin.

SANS LATEX.

AVERTISSEMENT : Réservé à un usage externe. Ne doit pas être injecté ni appliqué sur les yeux.

Conserver à température ambiante jusqu'à 25 °C (77 °F).

Ne pas congeler.

ÉLIMINATION : Les produits Anasept^{MD} sont sans danger pour l'environnement et peuvent être jetés dans un lavabo ou un système d'égout.

Commandes / Rendseignement : (800)-489-2591

Courriel : anacapa@anacapa-tech.net

www.anacapa-tech.net

Produit fabriqué aux États-Unis par :
Anacapa Technologies, Inc.
301 E. Arrow Highway Ste. 106
San Dimas, CA 91773, USA



Anasept^{MD} est une marque déposée appartenant à Anacapa Technologies, Inc.

Solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept^{MD},
notice en français

Version 01