

# anasept<sup>MD</sup>

Nettoyant antimicrobien pour la peau et les plaies

Pour hôpitaux et professionnels de la santé

**Santé Canada Licence # 97043**

Références de commande :

Référence catalogue 4004C	Capsule distributrice 4 oz (118.5 ml), 24 par boîte
Référence catalogue 4004SC	Pulvérisateur 4 oz (118.5 ml), 12 par boîte
Référence catalogue 4008C	Capsule distributrice 8 oz (237 ml), 12 par boîte
Référence catalogue 4008SC	Pulvérisateur 8 oz (237 ml), 12 par boîte
Référence catalogue 4008TC	Pulvérisateur à gâchette 8 oz (237 ml), 12 par boîte
Référence catalogue 4012SC	Pulvérisateur à gâchette 12 oz (355 ml), 12 par boîte
Référence catalogue 4016C	Capsule distributrice 15 oz (443 ml), 12 par boîte

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le nettoyant antimicrobien Anasept<sup>MD</sup> pour la peau et les plaies est un liquide isotonique transparent facilitant l'enlèvement mécanique des débris sur le site nettoyé, tout en appliquant 0,057 % d'hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large. Le nettoyant Anasept<sup>MD</sup> a aussi une action empêchant la croissance de diverses bactéries, notamment *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, ainsi que les souches résistantes aux antibiotiques (p. ex. *Escherichia coli* résistant au carbapénem (ERC), *Entérocooccus faecalis* résistants à la vancomycine (ERV) et *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) souvent présentes dans les plaies, de même que les microchampignons (p. ex. *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, et *Candida auris*).

## INDICATIONS :

**Vente libre :** Le nettoyant antimicrobien Anasept<sup>MD</sup> pour la peau et les plaies est commercialisé en vente libre pour le nettoyage et l'enlèvement mécanique des saletés, des débris et des corps étrangers sur les écorchures, les lacérations, les irritations mineures, les coupures, les sites de sortie et la peau intacte.

**Usage professionnel :** Le nettoyant antimicrobien Anasept<sup>MD</sup> pour la peau et les plaies peut être utilisé sous la supervision d'un professionnel de la santé pour l'enlèvement des microorganismes et d'autres corps étrangers sur diverses plaies, notamment les ulcères de pression I-IV, les ulcères de pied diabétique, les plaies post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de greffe et les plaies de donneur.

## MODE D'EMPLOI :

- Peau :**
- 1) Pulvériser le produit sur la zone à traiter ou appliquer une gaze imbibée de produit
  - 2) Laisser sécher à l'air libre ou conserver comme préparation humide
- Plaies :**
- 1) Pulvériser directement ou appliquer une gaze imbibée sur la plaie.
  - 2) Éviter la formation de micro-flaques et recouvrir avec un pansement approprié.
  - 3) Répéter au besoin.

**CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE JUSQU'À 25 °C (77 °F).  
NE PAS CONGELER.**

**Autres informations :** Le nettoyant Anasept<sup>MD</sup> est sans danger pour l'environnement. Le nettoyant Anasept peut être jeté dans un lavabo ou un système d'égout.

**SANS LATEX.**

**RÉSERVÉ À UN USAGE EXTERNE. NON CONÇU POUR UN USAGE OPHTALMIQUE.**



Fabriqué par : Anacapa Technologies, Inc.  
301 E. Arrow Highway Ste. 106  
San Dimas, CA 91773, USA  
(800)-489-2591  
www.anacapa-tech.net

Anasept<sup>MD</sup> est une marque déposée appartenant à Anacapa Technologies, Inc.

Produit fabriqué aux États-Unis

Version 02